

使用説明書

SEED

酸素透過性ハードコンタクトレンズ用洗浄液

ジェルクリン

ご使用前にこの使用説明書を必ずお読みください。

誤った使用方法は十分な洗浄効果が得られないばかりでなく、
眼障害等の原因になりますので、必ず記載事項に従い正しいレンズケアを行ってください。
コンタクトレンズの取り扱いについては、その添付文書をお読みください。

レンズに付着した汚れが落ちにくい場合に使用する、酸素透過性ハードレンズ用のこすり洗いクリーナーです。

内容量：5g／15g

主成分：IPA(イソプロピルアルコール)／非イオン界面活性剤／ゲル化剤

発売元：株式会社シード 東京都文京区本郷2-40-2

製造元：株式会社トレミー 東京

禁点眼

商品についてのお問い合わせは


禁内服

シードひとみコール

フリーダイヤル ミナヒトミ
0120 - 317103

使用方法

レンズを取り扱う前には、手指を石けんできれいに洗ってください。

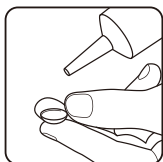

レンズの凹面が親指側になるように人さし指、中指、親指でレンズを持ちます。
レンズ表面に適量をたらし、指の腹で軽くこするようにして(約15秒)レンズの両面を洗浄します。



水道水で十分すすいでから装用(保存)します。

使用上の注意

- ソフトコンタクトレンズには使用できません。
- 誤って口や目に入った場合は、大量の水で洗い流し、医師の診療を受けてください。
- 小児に使用させる場合は、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 使用期限の過ぎたものおよび変質、変色したものは使用しないでください。また、開封後は速やかに使用してください。
- 直射日光や高温を避け、小児の手の届かないすずい場所で保管してください。
- 容器の口に指や他の容器が触れないようにしてください。使用後は必ずキャップをきちんと閉めてください。
- 誤使用を避け、品質を保持するために、他の容器に入れ替えないでください。
- 本液の使用により目や皮膚に異常を感じた場合は、すぐに使用を中止し、医師に相談してください。