

使用説明書

SEED

ハード/ソフトコンタクトレンズ用洗浄液

ジェルクリン W

ご使用前にこの使用説明書を必ずお読みください。

誤った使用方法は十分な洗浄効果が得られないばかりでなく、
眼障害等の原因になりますので、必ず記載事項に従い正しいレンズケアを行ってください。
コンタクトレンズの取り扱いについては、その添付文書をお読みください。

内容量：15g
主成分：IPA(イソプロピルアルコール)/シリコーン系界面活性剤/
非イオン界面活性剤/ゲル化剤
発売元：株式会社シード 東京都文京区本郷2-40-2
製造元：株式会社雪の元本店

商品についてのお問い合わせは

シードお客様相談室 **ひとみコール**

禁点眼


禁内服

0120-317103 受付時間
9:00~17:00
(土日・祝日を除く)


使用方法

レンズを取り扱う前には、手指を石けんできれいに洗ってください。洗浄の後は、十分すすぎを行ってください。


ソフトコンタクトレンズの場合

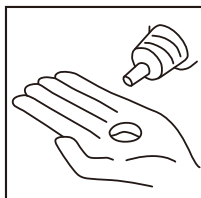

レンズの凹面を手のひらの上へのせ、本剤を適量たらしめます。

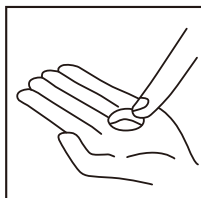


人さし指の腹で軽くこするようにして、(片面約15秒)レンズの両面を洗浄します。

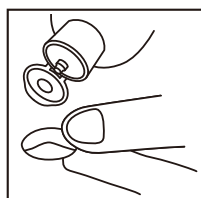


ソフトコンタクトレンズ用消毒液(シードソフトケア ピュア)やソフトコンタクトレンズ用すすぎ・保存液(ソフリンス)でヌルヌル感がなくなるまで十分すすいでから装用(消毒・保存)をします。

※毎日の消毒を忘れずに行ってください。

ハードコンタクトレンズの場合

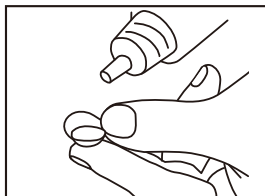

レンズの凹面が親指側になるように人さし指、中指、親指でレンズを持ちます。レンズ表面に適量をたらし、指の腹で軽くこするようにして(約15秒)レンズの両面を洗浄します。

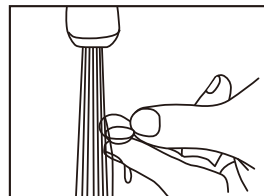

水道水で十分すすいでから装用(保存)します。

使用上の注意

- レンズを取り扱う前には、手指を石けんできれいに洗ってください。
- 誤って口や目に入った場合は、大量の水で洗い流し、医師の診察を受けてください。
- 小児に使用させる場合は、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 使用期限の過ぎたものおよび変質、変色したものは使用しないでください。また、開封後は速やかに使用してください。
- 直射日光や高温を避け、小児の手の届かないすずしい場所で保管してください。
- 容器の口に指や他の容器が触れないようにしてください。使用後は、必ずキャップをきちんと閉めてください。
- 誤使用を避け、品質を保持するために、他の容器に入れ替えしないでください。
- 本品の使用により目や皮ふに異常を感じた場合は、すぐに使用を中止し、医師に相談してください。