

使用説明書

SEED

酸素透過性ハードコンタクトレンズ用洗浄液

O₂クリン

ご使用前にこの使用説明書を必ずお読みください。

誤った使用方法は十分な洗浄効果が得られないばかりでなく、眼障害等の原因になりますので、必ず記載事項に従い正しいレンズケアを行ってください。コンタクトレンズの取り扱いについては、その添付文書をお読みください。

レンズに付着した汚れが落ちにくい場合に使用する酸素透過性ハードコンタクトレンズ用の微粒子入り強力クリーナーです。

内容量：15g

主成分：無機系微粒子／陰イオン界面活性剤

IPA(イソプロピルアルコール)／ゲル化剤

発売元：株式会社シード 東京都文京区本郷2-40-2

製造元：大木製薬株式会社 東京

禁点眼

商品についてのお問い合わせは

禁内服

シードひとみコール フリーダイヤル ミナヒトミ 0120-317103


使用方法

よく振ってから使用してください。

レンズを取り扱う前には、手指を石けんできれいに洗ってください。



レンズに本液を3～4滴たらし、指の腹で軽くこするようにして(約15秒)レンズの両面をていねいに洗浄します。

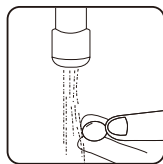

水道水で十分にすすいでから装用(保存)します。

※汚れが落ちにくい場合は、再度洗浄してください。

使用上の注意

※「シードS-1」など全ての表面処理レンズに使用できません。レンズ性能が低下します。

※使用後はキャップをしっかりと閉めてください。液が固まると使用できません。無理に押すと中栓が飛び出し、レンズを破損させたり目に入ったり衣服を汚すことがあります。

- ソフトコンタクトレンズには使用できません。
- 誤って口や目に入った場合は、大量の水で洗い流し、医師の診察を受けてください。
- 本液の使用により目や皮フに異常を感じた場合は、すぐに使用を中止し、医師に相談してください。
- 使用期限の過ぎたものおよび変質、変色したものは使用しないでください。また、開封後は速やかに使用してください。
- 容器の口に指や他の容器が触れないようにしてください。
- 誤使用を避け、品質を保持するために、他の容器に入れ替えないでください。
- 直射日光や高温を避け、小児の手の届かないすずしい場所で保管してください。
- 小児に使用させる場合は、保護者の指導監督のもとに使用させてください。