

使用説明書

SEED

酸素透過性ハードコンタクトレンズ用洗浄保存液

O₂ソリューション

ご使用前にこの使用説明書を必ずお読みください。

誤った使用法は十分な洗浄効果が得られないばかりでなく、眼障害等の原因になりますので、必ず記載事項に従い正しいレンズケアを行ってください。コンタクトレンズの取り扱いについては、その添付文書をお読みください。

本液は酸素透過性ハードコンタクトレンズ用洗浄保存液です。タンパク除去には「スーパーブロッター」(別売)を使用してください。

内容量：150mL/120mL

無菌調製液(除菌ろ過法)

主成分：陰イオン界面活性剤/緩衝剤

禁点眼

商品についてのお問い合わせは

発売元：株式会社シード 東京都文京区本郷2-40-2

禁内服

シードひとみコール フリーダイヤル ミナヒトミ 0120-317103


製造元：大木製薬株式会社 東京

使用方法


使用前にキャップを強くしめてボトルを開封します。

レンズを取り扱う前には、手指を石けんできれいに洗ってください。


<洗浄・保存する場合>

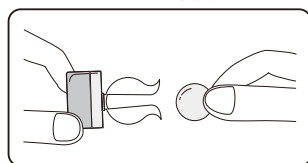

レンズをはずしホルダーに差し込みます。

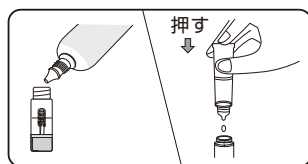


レンズケースに「O₂ソリューション」を9分目まで入れ、「スーパーブロッター」を2滴入れます。

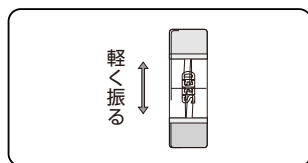


キャップを閉め、レンズケースを軽く振り、そのまま2時間以上放置します。

<はめる場合>

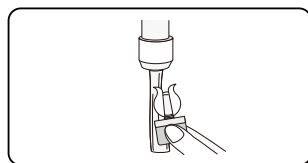

レンズをホルダーに差し込んだまま、水道水で十分にすすいでから装用します。

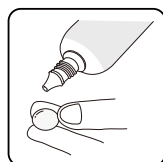

※週1回以上、装用前に本液でこすり洗いをしてください。

※レンズケースは水道水できれいに洗浄し、自然乾燥してください。

※汚れが落ちにくい場合は、こすり洗い用クリーナー「O₂クリン」または「ジェルクリン」(別売)をご使用ください。

使用上の注意

- ソフトコンタクトレンズには使用できません。
- 誤って口や目に入った場合は、大量の水で洗い流し、医師の診察を受けてください。
- 本液の使用により目や皮フに異常を感じた場合は、すぐに使用を中止し、医師に相談してください。
- 使用期限の過ぎたものおよび変質、変色したものは使用しないでください。また、開封後は速やかに使用してください。
- 一度使用した溶液は再使用しないでください。
- 容器の口に指や他の容器が触れないようにしてください。使用後は必ずキャップをきちんと閉めてください。
- 誤使用を避け、品質を保持するために、他の容器に入れ替えないでください。
- 直射日光や高温を避け、小児の手の届かないすずしい場所で保管してください。
- 小児に使用させる場合は、保護者の指導監督のもとに使用させてください。