

⚠ 使用上の注意

相談すること

① 次の人は使用前に医師または薬剤師に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人 (2) 本人または家族がアレルギー体質の人
(3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (4) 次の症状がある人・はげしい目の痛み

② 次の場合は直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

【販売名】コンティアa 指定医薬部外品

【効能・効果】ソフトコンタクトレンズまたはハードコンタクトレンズの装着を容易にする。


【用法・用量】1. コンタクトレンズの両面を本剤2～3滴で濡らします。

2. そのままレンズを眼に装着します。

○次の注意事項をお守りください。

- (1) 使用に関しては、この説明文書をよく読んでください。説明文書に記載されている用法・用量を守って使用してください。
(2) キャップ部分を軽く引っ張りながら、ゆっくりまわして開けてください。
(勢いよく開封すると、液が飛び散る場合があります)
(3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
(4) 本剤はコンタクトレンズの装着のみに使用し、飲まないでください。
(5) 混濁したものや変色したものは使用しないでください。
(6) コンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。

【成分・分量】100mL中：ポリビニルアルコール（部分けん化物）1.0g 添加物としてヒアルロン酸Na、無水リン酸一水素Na、無水リン酸二水素Na、塩化Na、塩化K、D-マンニトール、pH調整剤を含有する。

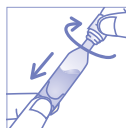

保管および取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
(2) 小児の手の届かない所に保管してください。
(3) 薬液を他の容器に入れ替えないでください。
(4) 1本を他の人と共用しないでください。
(5) 使用後に液が残っていても、再使用しないでください。
(6) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、一度内袋を開封した後は速やかに使用してください。
(7) 本剤を携帯する際、ズボンの後ろポケット等に入れてください。
(キャップ部分が折れて開いてしまう恐れがあります。)

■コンタクトレンズご使用の際の注意

- *コンタクトレンズを取り扱う前（つけるとき、はずすとき）には、手指を石けんでよく洗い、よくすすいでください。
*コンタクトレンズの取り扱いについては、レンズの添付文書をよく読み、その使用方法などを守ってください。
*コンタクトレンズを安全かつ快適に装着していただくために、眼科医による定期的な検査を必ず受けてください。

シードお客様相談室
ひとみコール
0120-317103
受付時間 9:00～17:00(土日・祝日を除く)

シードホームページ <http://www.seed.co.jp>

発売元：株式会社シード 東京都文京区本郷2-40-2

製造販売元：株式会社オプテクス 神戸市中央区港島南町5-2-4

ご使用前には必ずこの使用説明書をよくお読みください。
また、必要なときに読めるように大切に保管してください。

コンタクト装着前にレンズをうるおし、ゴロゴロ感を抑える装着液



3つの特長

うるおいベールでレンズを保湿

保湿成分ヒアルロン酸Naとポリビニルアルコールが配合されているので、レンズにうるおい層をつくり、乾燥から守ります。瞳とレンズの間でクッションの働きをし、装着時のゴロゴロ感、違和感を抑えます。

いつでも清潔な使い切りタイプ

1回使い切りタイプなので、いつでも衛生的に使用できます。さらに防腐剤フリーで瞳にやさしい使い心地です。

汚れをブロック！

うるおい層のバリアがタンパク質の汚れをシャットアウトするので、汚れが付きにくくなります。

使用方法



1 レンズに
直接液を落とす。
1回2～3滴



2 そのまま
レンズを目に
装着する