

# 使用説明書

SEED

ソフトコンタクトレンズ用保存すすぎ液

## ソフリンス

ご使用前にこの使用説明書を必ずお読みください。

誤った使用方法は十分な洗浄効果が得られないばかりでなく、眼障害等の原因になりますので、必ず記載事項に従い正しいレンズケアを行ってください。コンタクトレンズの取り扱いについては、その添付文書をお読みください。

本液はソフトコンタクトレンズ用の保存すすぎ液です。

内容量：150mL

主成分：塩化ナトリウム／塩化カリウム

発売元：株式会社シード 東京都文京区本郷2-40-2

製造元：大木製薬株式会社 東京

無菌調製液(除菌ろ過法)

商品についてのお問い合わせは

禁内服


シードひとみコール

フリーダイヤル ミナヒトミ  
0120-317103

### 使用方法


使用前にキャップを強くしめてボトルを開封します。  
レンズを取り扱う前には、手指を石けんできれいに洗ってください。

#### <保存する場合>

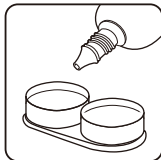

レンズケースに本液を入れます。  
液はレンズケースの記載事項にある分量を入れてください。

#### <すすぐ場合>

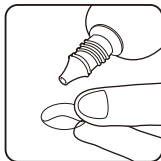

洗浄液で洗浄後のレンズを、本液でヌルヌル感がなくなるまで十分にすすぎます。

※「ソフトメイト」でレンズケアの場合は、装用前およびタンパク処理後のこすり洗いに使用します。詳しくは「ソフトメイト」の添付文書をお読みください。

### 使用上の注意

※本液に消毒効果はありません。

- 誤って口に入った場合は、大量の水で洗い流し、医師の診察を受けてください。
- 本液の使用により目や皮フに異常を感じた場合は、すぐに使用を中止し、医師に相談してください。
- 使用期限の過ぎたものおよび変質、変色したものは使用しないでください。また、開封後は速やかに使用してください。
- 一度使用した溶液は再使用しないでください。
- 容器の口に指や他の容器が触れないようにしてください。使用後は必ずキャップをきちんと閉めてください。
- 誤使用を避け、品質を保持するために、他の容器に入れ替えしないでください。
- 直射日光や高温を避け、小児の手の届かないすずしい場所で保管してください。
- 小児に使用させる場合は、保護者の指導監督のもとに使用させてください。