

## 使用説明書

# SEED

ソフトコンタクトレンズ用洗浄液

# シードゥソフトジェル

### ご使用前にこの使用説明書を必ずお読みください。

誤った使用法は十分な洗浄効果が得られないばかりでなく、眼障害等の原因になりますので、必ず記載事項に従い正しいレンズケアを行ってください。コンタクトレンズの取り扱いについては、その添付文書をお読みください。

レンズに付着した汚れが落ちにくい場合に使用する、ソフトコンタクトレンズ用のこすり洗いクリーナーです。

内容量: 15g


主成分: 非イオン界面活性剤/湿潤剤/ゲル化剤

禁内服


禁点眼

### 使用方法


レンズを取り扱う前には、手指を必ず石けんでよく洗い、よくすすいでください。

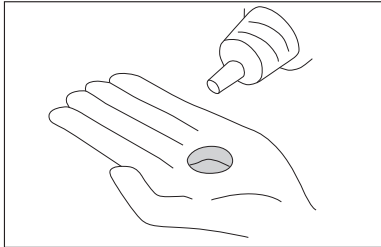

①レンズの凹面を手のひらの上にのせ、シードゥソフトジェルを適量たらしめます。

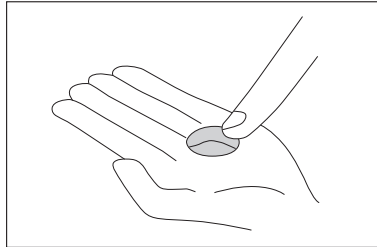

②爪がレンズに触れないように注意しながら、人差し指の腹で軽くこするようにして、(片面約15秒)レンズの両面を洗浄します。

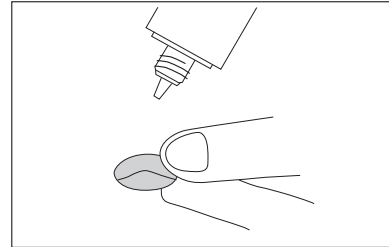

③ソフトコンタクトレンズ用消毒液<シードゥソフトケア>やソフトコンタクトレンズ用すすぎ・保存液<ソフリンス>でヌルヌル感がなくなるまで十分にすすいでから装用(消毒・保存)をします。

### 使用上の注意

- レンズを取り扱う前には、手指を必ず石けんでよく洗い、よくすすいでください。
- 酸素透過性ハードコンタクトレンズには使用できません。
- 誤って口や目に入った場合は、大量の水で洗い流し、医師の診療を受けてください。
- 小児に使用させる場合は、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 使用期限の過ぎたものおよび変質、変色したものは使用しないでください。また、開封後は速やかに使用してください。
- 直射日光や高温を避け、小児の手の届かないすずしい場所で保管してください。
- 容器のノズル先端が、指や他の容器に触れないようにしてください。使用後は、必ずキャップをきちんと閉めてください。
- 誤使用を避け、品質を保持するために、他の容器に入れ替えしないでください。
- 本品の使用により目や皮ふに異常を感じた場合は、すぐに使用を中止し、医師に相談してください。

商品についてのお問い合わせは

シードひとみコール

フリーダイヤル 0120-317103

シード ホームページ <http://www.seed.co.jp>

発売元:株式会社シード 〒113-8402 東京都文京区本郷2-40-2  
製造販売元:株式会社トレミー 〒183-0027 東京都府中市本町4-18-4

2010年1月作成