

## 使用説明書

SEED

ソフトコンタクトレンズ用  
こすり洗い・すすぎ・消毒・保存液

医薬部外品

輸入品


# Soft ワンボトル クリア

- ご使用前には、必ずこの使用説明書をよくお読みください。また、必要な時に読めるように大切に保管してください。
- この使用説明書に記載された使用方法や注意事項に従って、正しく使用してください。取り扱い方法を誤ると、洗浄・消毒が不完全となり、細菌やアカントアメーバの繁殖をまねき、眼の感染症などが生じる原因となったり、それが進行して視力を失う危険性も生じます。
- 少しでも異常を感じたら直ちに眼科医の検査を受けてください。
- 今お使いのソフトコンタクトレンズの取り扱いについては、レンズの添付文書をよく読み、その使用方法などを守ってください。

ソフトコンタクトレンズは水分を含んだ素材でできているため、装用中に涙液に含まれるタンパク質、脂質、カルシウムなどの汚れがレンズに付着します。これらの汚れはそのままにしておくと装用感が悪くなるだけでなく、視力矯正力を低下させたり、細菌やカビの繁殖にもつながり、目に炎症を起こす場合があるため、ソフトコンタクトレンズは装用後のこすり洗い洗浄と消毒（保存）が不可欠です。Soft ワンボトルクリアは、ソフトコンタクトレンズのこすり洗い・消毒・保存が1本でできる便利なケアシステムです。

### 使用方法

レンズを取り扱う前（つけるとき、はずすとき）には、手指を必ず石けんでよく洗い、よくすすぎます。

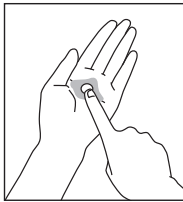


#### ① こすり洗い

目からはずしたレンズを手のひらにのせ、本剤を数滴たらしレンズの両面を20秒指の腹で軽くこすり洗いをします。



#### ② すすぎ

レンズの両面を十分な量の本剤でよくすすぎます。

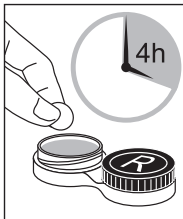

#### ③ 消毒

レンズケースに新しい本剤を満たし、レンズを完全に浸します。レンズケースのキャップをしっかりと締め、4時間以上放置すると消毒は完了です。



#### ④ 装用前のすすぎ

装用前に、レンズの両面を十分な量の本剤で、よくすすぎます。

\* 使用後のレンズケースは液を捨て、本剤でよく洗った後、液を振り切り、自然乾燥させてください。

### タンパク除去

ソフトコンタクトレンズのケアが十分でなかったり体質によっては汚れが付着する場合があります。レンズの汚れは、装用感の悪さ、乾燥感や異物感、曇り易さの原因となりますので、タンパク分解酵素洗浄液「シードゥ タンパク除去剤」（別売り）のご使用をお勧めします。シードゥ タンパク除去剤をご使用の際には、必ず製品の使用説明書をよく読み、その使用方法に従ってください。

## 使用上の注意

### ●守らなければならないこと

- ① この説明書に記載してある使用方法を厳守してください。使用方法を誤ると消毒が不完全となり、目の感染症や、角膜潰瘍などの重い眼障害の原因となることもあります。また、それを治療せずに放置すると失明してしまうこともあります。
- ② レンズを取り扱う前（つけるとき、はずすとき）には、手指を必ず石けんでよく洗い、よくすすいでください。
- ③ この説明書の使用方法に従い、必ずこすり洗いを行ってください。
- ④ 定められた消毒時間（4時間以上）を必ず守ってください。消毒が終わっていない状態で、レンズを装着しないでください。
- ⑤ レンズを取り出した後のケースは、必ず液を捨てて新しい本剤でよく洗った後、液を振り切り、自然乾燥させてください。清潔なレンズケースを使用しないと、レンズケース内で雑菌が繁殖し、目へ感染し、角膜潰瘍等の重い眼障害の原因となることもあります。
- ⑥ 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

### ●してはいけないこと

- ① 本剤はソフトコンタクトレンズのこすり洗い・すすぎ・消毒・保存にのみ使用し、飲まないでください。
- ② 容器のノズル先端がコンタクトレンズや指先などに触れると、雑菌などのため、本剤が汚染又は混濁することがありますのでご注意ください。また混濁したものや変色したものは使用しないでください。
- ③ 本剤は煮沸消毒に使用しないでください。また他のソフトコンタクトレンズ用消毒剤と混ぜて使用しないでください。
- ④ レンズを取り出した後のケース内の液は必ず捨て、毎回新しい本剤を使用してください。
- ⑤ 1度出した本剤を再びボトル容器に戻さないでください。
- ⑥ 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

### ●相談すること

- ① 次の人は使用前に眼科医にご相談ください。
  - a. 今までに目のアレルギー症状（例えば、目の充血、かゆみ、はれ、発疹、発赤など）を起こしたことがある人。
  - b. 医師の治療を受けている人。
- ② 本剤を使用したソフトコンタクトレンズを装着中、または装着後に、痛み、充血、流涙、目やに、ごごろ感（または異物感）、かすみ目、かわき、まぶしさなどの異常を感じた場合には、直ちにレンズをはずし、眼科医に相談してください。そのまま装着し続けると、目の感染症や角膜潰瘍などの重い眼障害につながる場合があります。
- ③ 本剤を使用中にじんましん、息苦しさなどの異常があらわれた場合には直ちに使用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。特にアレルギー体質の人や、薬などで発疹などの過敏症状を経験したことがある人は、十分注意して使用してください。

販売名 : ソフトケアC

有効成分 : 塩酸ポリヘキサニド 1.0ppm 含有

効能又は効果 : ソフトコンタクトレンズ（グループⅠ～グループⅣ）の消毒

配合成分 : 緩衝剤、金属封鎖剤、等張化剤、湿潤剤、界面活性剤

表示指定成分 : ホウ酸、エデト酸塩

\* 本剤はポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコールを含有しています。

用法及び用量 : 1. ソフトコンタクトレンズに本剤を数滴たらし、レンズの両面を 20 秒こする。

2. 本剤でレンズをすすぐ。

3. レンズケースに本剤を満し、レンズを浸漬する。

4. レンズケースのフタをしっかりと締め、4 時間以上放置する。

### 保管及び取り扱い上の注意

- ① 小児の手の届かない所に保管してください。
- ② 使用後は、キャップをしっかりと締めて、直射日光を避け、室温で保管してください。
- ③ 誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
- ④ 本剤をご使用の際には、パッケージに同梱されている専用レンズケースを使用してください。  
また、本剤以外の消毒剤では使用しないでください。
- ⑤ 専用ケースは熱に弱いので、煮沸消毒には使用しないでください。
- ⑥ レンズケースは、長時間使用していると汚れなどの蓄積により細菌の繁殖をまねくことがありますので製品購入ごとに新しいレンズケースと交換してください。
- ⑦ 容器を開封したら、1ヶ月を目安に使用してください。
- ⑧ 使用期間が定められていないレンズを長期間使用しない場合は、使用方法に従いケアを行い、冷暗所に保管してください。  
ただし、少なくとも1ヶ月に1度は使用方法に従ってケアを行ってください。また、装着する場合には必ず使用方法に従ってケアを行ってから装着してください。使い捨て、交換タイプのレンズは、使用期間に従って使用してください。

商品についてのお問い合わせは



Seed ホームページ <http://www.seed.co.jp>

製造販売元:株式会社シード 〒113-8402 東京都文京区本郷2-40-2

2013年6月作成