

# コレクトクリーン使用説明書

## correct clean

コレクトクリーン

**点眼・服用厳禁**

酸素透過性ハードコンタクトレンズ用  
タンパク洗浄液

コレクトクリーン専用ケースが必要です。  
オルソケラトロジーレンズにも使えます。

毎日のお手入れでは除去できない酸素透過性ハードコンタクトレンズに付着したタンパク汚れを、強力に洗浄するつけ置きタイプの洗浄液です。酸素透過性ハードコンタクトレンズは1ヵ月に1回、オルソケラトロジーレンズは2週間に1回を目安に使用してください。

※使用回数は目安です。レンズ汚れには個人差がありますので、眼科医の指示に従い使用してください。

[主成分] A液:次亜塩素酸ナトリウム(5mL)  
B液:臭化カリウム(5mL)

**ご使用前にこの使用説明書を必ずお読みください。  
また、必要時に読めるよう大切に保管してください。**

誤った使用法は十分な洗浄効果が得られないばかりでなく、眼障害等の原因になりますので、必ず記載事項に従い正しいレンズケアを行ってください。コンタクトレンズの取り扱いについては、その取扱説明書または添付文書をお読みください。


### 保管および取り扱い上の注意

- 直射日光や高温を避け、小児の手の届かないすずしい場所で保管してください。
- 品質を保持するため、他の容器に入れ替えしないでください。
- 溶液ボトルの口に指や他の容器が触れないようにしてください。
- 開封後は速やかに使用してください。


### 使用方法

- レンズを取り扱う前には、手指を石けんできれいに洗ってください。
- レンズに爪が触れないように注意してください。
- 溶液ボトルはレンズケアをする直前に開封してください。
- 専用ケースを必ず使用してください。

①レンズを洗浄保存液でこすり洗いし水道水でよくすすぎます。

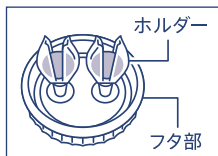

②専用ケースのフタ部ホルダーの「R」に右レンズ、「L」に左レンズを差し込みます。

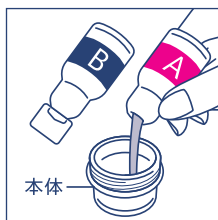

③専用ケース本体にA液1本とB液1本をゆっくりと注ぎいれます。

※溶液ボトルは、開口部を上にして、上部をゆっくりと回して開けてください。  
溶液本体を強く押ししたり、上部を強く回したりすると液が飛び出すおそれがあります。

④フタ部を専用ケース本体にかぶせ、しっかりと回し閉めます。



⑤専用ケースをケース内の液が混ざるように2~3回軽く振り、そのまま30分間つけ置きします。

### 使用上の注意

- 絶対に点眼・服用しないでください。誤って眼に入った場合は、すぐに水道水で15分以上よく洗い流し、直ちに眼科を受診してください。誤って飲んだ場合は、すぐに口をよくすすぎ、牛乳または水を多量に飲み、直ちに医師の診察を受けてください。
- 本品の使用により眼や皮膚に少しでも異常を感じた場合は、すぐに使用を中止し直ちに医師の診察を受けてください。
- 今までにケア用品によってアレルギー症状等がみられた方は、事前に眼科医に相談してください。
- ソフトコンタクトレンズには使用できません。
- 本品外箱の適合レンズ一覧にないレンズには使用しないでください。
- 本品の次亜塩素酸液は強アルカリ性です。誤った取り扱いは大変危険ですので、使用方法を守って使用してください。
- 本品に酸性タイプの製品を混ぜて使用しないでください。有害な塩素ガスが発生し危険です。
- 小児が使用する場合には、保護者の指導監督のもと使用させてください。
- 使用期限を過ぎたものは使用しないでください。溶液ボトルラベルの☒は使用期限です。  
例) “☒ YYYYY.MM” は“使用期限YYYY年MM月まで”
- 変質・変色したものは使用しないでください。
- 洗浄時間を超えた使用はしないでください。レンズが脱色・変色する場合があります。
- 液が皮膚についた場合は、すぐに水道水でよく洗い流してください。
- 液を衣服などに付着させないでください。脱色・変色する場合があります。誤って付着させた場合は、すぐに水道水でよく洗い流してください。
- 液が入ったままの専用ケースを持ち運びしないでください。液が漏れる場合があります。
- 洗浄後のレンズは水道水で十分にすすいでください。すすぎが不十分なレンズを装用すると、目に痛みを感じ眼障害を引き起こす原因となります。
- 一度使用した液は再使用しないでください。使用後の液はすみやかに捨ててください。

⑥フタ部を外し、レンズをホルダーごと水道水で30秒以上すすぎます。

※フタ部を外す際は、液がこぼれたり飛んだりしないように、真上にあげるように外してください。

**洗浄後のレンズは絶対にそのまま装用しないでください。眼障害につながります。**



⑦洗浄保存液でこすり洗いを行い、水道水でよくすすいでから装用してください。

保存する場合、洗浄保存液でこすり洗いを行い、水道水でよくすすぎます。レンズケースに洗浄保存液を入れ、レンズを保存してください。

※専用ケースは水道水でよくすすぎ、自然乾燥させてください。

[発売元] 株式会社シード  
東京都文京区本郷2-40-2  
<https://www.seed.co.jp>

シードお客様相談室  
ミナヒトミ  
**0120-317103**

受付時間 9:00~17:00(土日・祝日を除く)