

SEED

ソフトコンタクトレンズ用消毒剤

医薬部外品

日本製

Forest Leaf


フォレストリーフ うるおいW

- ご使用前には、必ずこの添付文書をよくお読みください。また、必要な時に読めるように大切に保管してください。
- この添付文書に記載された使用方法や注意事項に従って、正しく使用してください。取り扱い方法を誤ると、洗浄・消毒が不完全となり、細菌やアcantアメーバの繁殖をまねき、眼の感染症などの原因となり、それが進行して視力を失う危険性も生じます。
- 少しでも眼に異常を感じたら直ちに眼科を受診してください。
- 今お使いのソフトコンタクトレンズの取り扱いについては、レンズの添付文書をよく読み、その使用方法などを守ってください。

ソフトコンタクトレンズは水分を含んだ素材でできているため、装用中に涙液に含まれるタンパク質、脂質、カルシウムなどの汚れがレンズに付着します。これらの汚れはそのままにしておくとう装用感が悪くなるだけでなく、視力矯正力の低下や、細菌やカビの繁殖にもつながり、眼に炎症を起こす場合がありますため、ソフトコンタクトレンズは装用後のこすり洗い洗浄と消毒（保存）が不可欠です。フォレストリーフうるおいWは、ソフトコンタクトレンズの洗浄・すすぎ・消毒・保存が1本でできる便利なケアシステムです。

使用方法

レンズを取り扱う前（つけるとき、はずすとき）には、手指を必ず石けんでよく洗い、よくすすぎます。

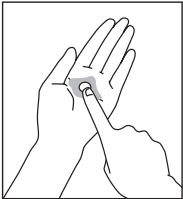

① こすり洗い

眼からはずしたレンズを手のひらにのせ、本剤を数滴たらしレンズの両面を20秒指の腹で軽くこすり洗いをします。



②すすぎ

レンズの両面を十分な量の本剤でよくすすぎます。



③消毒

レンズケースに新しい本剤を満たし、レンズを完全に浸します。レンズケースのキャップをしっかりと締め、4時間以上放置すると消毒は完了です。



④装用前のすすぎ

装用前に、レンズの両面を十分な量の本剤で、よくすすぎます。

* 使用後のレンズケースは液を捨て、本剤でよく洗った後、液を振り切り、自然乾燥させてください。

タンパク除去

ソフトコンタクトレンズのケアが不十分な場合や、体質によっては汚れが付着しやすくなります。レンズの汚れは、装用感の悪さ、乾燥感や異物感、曇り易さの原因となりますので、タンパク分解酵素洗浄液（別売り）のご使用をお勧めします。

使用上の注意

●守らなければならないこと

- ① この添付文書に記載してある使用方法を厳守してください。使用方法を誤ると消毒が不完全となり、眼の感染症や、角膜潰瘍などの重い眼障害の原因となることがあります。また、それを治療せずに放置すると失明してしまうこともあります。
- ② レンズを取り扱う前（つけるとき、はずすとき）には、手指を必ず石けんでよく洗い、よくすすいでください。
- ③ この添付文書の使用方法に従い、必ずこすり洗いを行ってください。
- ④ 定められた消毒時間（4時間以上）を必ず守ってください。消毒が終わっていない状態で、レンズを装着しないでください。
- ⑤ レンズを取り出した後のケースは、必ず液を捨てて新しい本剤でよく洗った後、液を振り切り、自然乾燥させてください。清潔なレンズケースを使用しないと、レンズケース内で雑菌が繁殖し、眼へ感染し、角膜潰瘍等の重い眼障害の原因となることがあります。
- ⑥ 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- ⑦ 特に自覚症状がなくても、眼科医による定期検査を受けてください。

●してはいけないこと

- ① 本剤はソフトコンタクトレンズのこすり洗い・すすぎ・消毒・保存にのみ使用し、飲まないでください。
- ② 容器のノズル先端がコンタクトレンズや指先などに触れると、雑菌などのため、本剤が汚染又は混濁することがありますのでご注意ください。また混濁したものや変色したものは使用しないでください。
- ③ 本剤は煮沸消毒に使用しないでください。また他のソフトコンタクトレンズ用消毒剤と混ぜて使用しないでください。
- ④ レンズを取り出した後のケース内の液は再使用しないでください。必ず毎回新しい本剤を使用してください。
- ⑤ 一度出した本剤を再びボトル容器に戻さないでください。
- ⑥ 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

●相談すること

- ① 次の人は使用前に眼科医にご相談ください。
 - a. 今までに眼のアレルギー症状（例えば、眼の充血、かゆみ、はれ、発疹、発赤など）を起こしたことのある人。
 - b. 医師の治療を受けている人。
- ② 本剤を使用したソフトコンタクトレンズを装着中、または装着後に、痛み、充血、流涙、目ヤニ、ごろごろ感（または異物感）、かすみ目、かわき目、まぶしさなどの異常を感じた場合には、直ちにレンズをはずし、眼科を受診してください。そのまま装着し続けると、眼の感染症や角膜潰瘍などの重い眼障害につながるがあります。
- ③ 本剤を使用中にじんましん、息苦しさなどの異常があらわれた場合には直ちに使用を中止し、医師の診察を受けてください。特にアレルギー体質の人や、薬などで発疹などの過敏症状を経験したことがある人は、十分注意して使用してください。

販売名	: ソフトケアC
有効成分	: 塩酸ポリヘキサニド 1.0ppm 含有
効能又は効果	: ソフトコンタクトレンズ（グループⅠ～グループⅣ）の消毒
配合成分	: 緩衝剤、金属封鎖剤、等張化剤、湿潤剤、界面活性剤
表示指定成分	: エデト酸塩
	* 本剤はポリオキシエチレンポリオキシシロピレングリコールを含有しています。
用法及び用量	: レンズ取り扱い前に手指を石けんでよく洗い、よくすすぐ
	1. ソフトコンタクトレンズに本剤を数滴たらし、レンズの両面を 20 秒こする。
	2. 本剤でレンズをすすぐ。
	3. レンズケースに本剤を満たし、レンズを浸漬する。
	4. レンズケースのフタをしっかりと締め、4 時間以上放置する。
	5. 装着前にレンズ両面を本剤で十分にすすぐ。

保管及び取り扱い上の注意

- ① 小児の手の届かない所に保管してください。
- ② 使用後は、キャップをしっかりと締めて、直射日光を避け、室温で保管してください。
- ③ 誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
- ④ 本剤をご使用の際には、パッケージに同梱されている専用レンズケースを使用してください。また、本剤以外の消毒剤では使用しないでください。
- ⑤ 専用ケースは熱に弱いため、煮沸消毒には使用しないでください。
- ⑥ レンズケースは、長時間使用していると汚れなどの蓄積により細菌の繁殖をまねくことがありますので製品購入ごとに新しいレンズケースと交換してください。
- ⑦ 容器を開封したら、1 か月を目安に使用してください。
- ⑧ レンズを長期間使用しない場合は、使用方法に従いケアを行い、冷暗所に保管してください。ただし、少なくとも1 か月に1度は使用方法に従ってケアを行ってください。また、装着する場合には必ず使用方法に従ってケアを行ってから装着してください。

シードお客様相談室

受付時間
0120-317103
9:00~17:00
(土日・祝日を除く)

シードホームページ <https://www.seed.co.jp>

製造販売業者: 株式会社シード 東京都千代田区神田錦町2-11

2022年4月作成

2112/2112
AP2A1