

# 使用説明書



ハード/ソフトコンタクトレンズ用洗浄剤

# ジェルクリン W

ご使用前にこの使用説明書を必ずお読みください。

誤った使用法は十分な洗浄効果が得られないばかりでなく、眼障害等の原因になりますので、必ず記載事項に従い正しいレンズケアを行ってください。コンタクトレンズの取り扱いについては、その添付文書をお読みください。

本剤はレンズに付着した汚れが落ちにくい場合に使用する、ソフトコンタクトレンズとハードコンタクトレンズ両用のこすり洗いクリーナーです。

内容量 15g  
主成分 IPA(イソプロピルアルコール)、シリコーン系界面活性剤、非イオン界面活性剤、ゲル化剤


**点眼・服用厳禁**

## 使用方法

\*レンズを取り扱う前には、手指を石けんできれいに洗ってください。

### ● ソフトコンタクトレンズの場合


① レンズを手のひらにのせ、本剤を適量たらしめます。

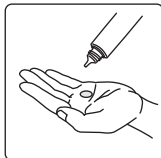

② 人さし指の腹で軽くこするようにして、(片面約 15 秒) レンズの両面を洗浄します。




③ ソフトコンタクトレンズ用消毒剤(MPS) やソフトコンタクトレンズ用すすぎ・保存液でヌルヌル感がなくなるまで十分すすいでから装用(消毒・保存)します。

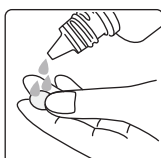


### ● ハードコンタクトレンズの場合

① レンズの凹面が親指側になるように人さし指、中指、親指でレンズを持ちます。

② レンズ表面に本剤を適量たらし、指の腹で軽くこするようにして(約 15 秒) レンズの両面を洗浄します。

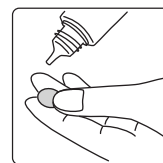

③ 水道水で十分すすいでから装用(保存)します。

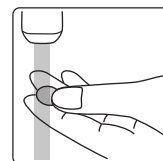

## 使用上の注意

- 誤って口や眼に入った場合は、多量の水で洗い流し、医師の診察を受けてください。
- 本剤の使用により眼や皮膚に異常を感じた場合は、すぐに使用を中止し、医師の診察を受けてください。
- 今までにケア用品によってアレルギー症状などを起こしたことがある場合は、事前に眼科医に相談してください。
- 使用期限の過ぎたものおよび変質・変色したものは使用しないでください。また、開封後は速やかに使用してください。

- 容器の口に指や他の容器が触れないようにしてください。使用後は必ずキャップをきちんと閉めてください。
- 誤使用を避け、品質を保持するために、他の容器に入れ替えしないでください。
- 直射日光や高温を避け、小児の手の届かないすずしい場所で保管してください。
- 小児に使用させる場合は、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

シードお客様相談室

ミナヒトミ 受付時間 9:00~17:00

0120-317103

(土日・祝日を除く)

シードホームページ

<https://www.seed.co.jp>

発売元 株式会社シード 東京都文京区本郷2-40-2  
製造元 株式会社雪の元本店、奈良

2026年2月  
2602-SD