

シードゥ タンパク除去剤

ご使用前にこの使用説明書を必ずお読みください。

誤った使用法は十分な洗浄効果が得られないばかりでなく、眼障害等の原因になりますので、必ず記載事項に従い正しいレンズケアを行ってください。コンタクトレンズの取り扱いについては、その添付文書をお読みください。

「シードゥ ソフトケア」用のタンパク除去剤です。「シードゥ ソフトケア」に毎日加えることで、消毒とタンパク除去が同時に行えます。

内容量：4mL/2mL

主成分：タンパク分解酵素

発売元：株式会社シード 東京都文京区本郷2-40-2

製造元：大木製薬株式会社 東京

禁点眼


商品についてのお問い合わせは

禁内服

シードひとみコール フリーダイヤル ミナヒトミ
0120-317103


使用方法

レンズを取り扱う前には、手指を石けんできれいに洗ってください。

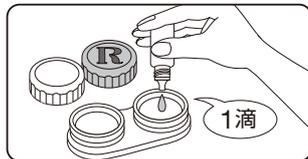


レンズケースにソフトコンタクトレンズ用消毒液「シードゥ ソフトケア」を満し、「シードゥ タンパク除去剤」を左右各1滴ずつ入れます。

※本品を2滴以上加えないように注意してください。

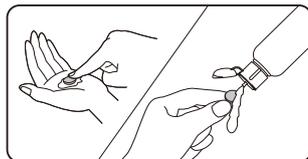


レンズをはずし手のひらにのせ、「シードゥ ソフトケア」でレンズの両面をこすり洗った後、よくすすぎます。

※レンズに爪が触れないように注意してください。

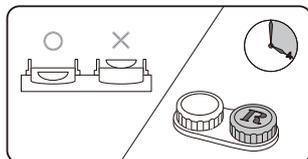

レンズをケースに入れ、液の中に完全に浸っていることを確認してから、キャップをしっかりと締めます。ケース内の液が混ざるように4~5回軽く振ります。

そのまま4時間以上放置すると消毒・タンパク除去が完了します。

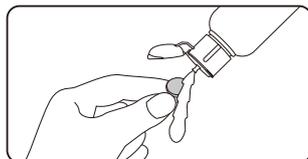

処理後のレンズは「シードゥ ソフトケア」で十分にすすいでから装着します。

※使用後のレンズケースは、液を捨て「シードゥ ソフトケア」でよく洗った後自然乾燥させてください。

【レンズの長期保存方法】

※レンズの装用を一時中止して長期保存する場合は、タンパク除去後に、レンズとケース内を「シードゥ ソフトケア」でよくすすぎ、新たに「シードゥ ソフトケア」を満したケースにレンズを入れ、直射日光のあたらないすずしい場所に保管してください。

※「シードゥ ソフトケア」に「シードゥ タンパク除去剤」を入れた液に、レンズを長期間保存しないでください。

使用上の注意

- ハードコンタクトレンズには使用できません。
- 誤って口や目に入った場合は、大量の水で洗い流し、医師の診療を受けてください。
- 小児に使用させる場合は、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 一度使用した溶液は再使用しないでください。
- 使用期限の過ぎたものおよび変質、変色したものは使用しないでください。また、開封後は速やかに使用してください。
- 直射日光や高温を避け、小児の手の届かないすずしい場所で保管してください。
- 容器の口に指や他の容器が触れないようにしてください。使用後は必ずキャップをきちんと締めてください。
- 誤使用を避け、品質を保持するために、他の容器に入れ替えないでください。
- 本品の使用により目や皮フに異常を感じた場合は、すぐに使用を中止し、医師に相談してください。
- 本品は「シードゥ ソフトケア」用のタンパク分解酵素洗浄液です。必ず「シードゥ ソフトケア」と組み合わせて使用してください。