

スーパープロツ

ご使用前にこの使用説明書を必ずお読みください。また、必要時に読めるよう大切に保管してください。

誤った使用法は十分な洗浄効果が得られないばかりでなく、眼障害等の原因になりますので、必ず記載事項に従い正しいレンズケアを行ってください。コンタクトレンズの取り扱いについては、その添付文書をお読みください。

本液は洗浄保存液「O₂ソリューション」と組み合わせて、レンズに付着した汚れを保存中に洗浄するつけ置きタイプのタンパク除去剤です。

点眼・服用厳禁 5mL 主成分 タンパク分解酵素

使用期限(EXP.)、製造番号(LOT.)は容器側面に記載




キャップをはずし、底面をゆっくり押しすと1滴ずつ液が出ます。

使用方法


※レンズを取り扱う前には、手指を石けんできれいに洗ってください。

〔レンズを洗浄・保存する場合〕

①レンズをはずしホルダーに差し込みます。

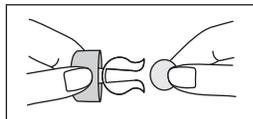

②レンズケースに「O₂ソリューション」を9分目まで入れ、「スーパープロツ」をレンズ1枚につき1滴入れます。

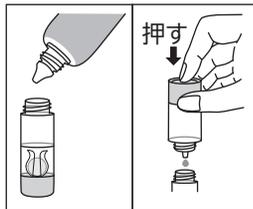


③キャップを閉め、レンズケースを軽く振り、そのまま2時間以上保存します。



〔レンズをつける場合〕

④レンズをホルダーに差し込んだまま、水道水ですすぎます。

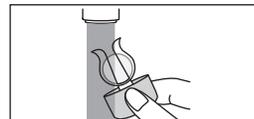

⑤レンズをホルダーから取り出し、「O₂ソリューション」を5~6滴たらし、こすり洗いします。



⑥水道水で十分にすすいであらってから装用します。

※レンズケースは水道水できれいに洗浄し、自然乾燥させてください。

汚れが落ちにくい場合は、別売りのこすり洗い用クリーナー「O₂クリン」または「ジェルクリン」シリーズをご使用ください。

使用上の注意

- 「O₂ソリューション」と組み合わせて使用してください。
- ソフトコンタクトレンズには使用できません。
- 誤って口や眼に入った場合は、多量の水で洗い流し、医師の診察を受けてください。
- 本液の使用により眼や皮膚に異常を感じた場合は、すぐに使用を中止し、医師の診察を受けてください。
- 今までにケア用品によってアレルギー症状などを起こしたことがある場合は、事前に眼科医に相談してください。
- 使用期限の過ぎたものおよび変質・変色したものは使用しないでください。また、開封後は速やかに使用してください。
- 一度使用した液は再使用しないでください。

- 皮フや衣服についた場合は、すぐに水道水で洗い流してください。
- 容器の口に指や他の容器が触れないようにしてください。使用後は必ずキャップをきちんと閉めてください。
- 誤使用を避け、品質を保持するために、他の容器に入れ替えしないでください。
- 直射日光や高温を避け、小児の手の届かないすずしい場所で保管してください。
- 小児に使用させる場合は、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- レンズケースは長期間使用していると汚れなどが蓄積し不衛生になることがあるため、定期的に新しいレンズケースに交換してください。