

ハードコンタクトレンズの使い方・お手入れ


2液型のお手入れ 「東レ洗浄保存液」「東レバイオクリーナー」を使用

この内容は、取扱説明書の一部を抜粋したものです。
ご使用に際しては、必ずレンズに付属の添付文書および取扱説明書をお読み下さい。


。レンズを取扱う前に



○よい状態

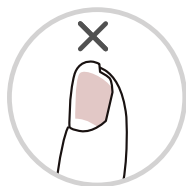

×爪が欠けた状態

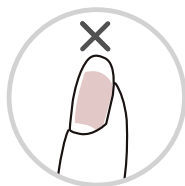

×爪が伸びた状態

- ・レンズを傷つけないように爪を短く切り、先を丸くなめらかにしてください。
- ・レンズに触れる前に手指を石けんできれいに洗い、石けん分が残らないように十分すすいでください。

用意するもの(指定ケア用品)



東レ洗浄保存液
(洗浄・保存液)



東レバイオクリーナー
(酵素洗浄液)

※保存ケースは定期的新しいものに取り替えることをおすすめします。
(ケースの汚れが原因で眼に悪影響を及ぼすこともあります)

▲ご注意


コンタクトレンズはデリケートな瞳に直接触れる医療機器です。
取扱い方法を誤ると思わぬトラブルを招くこともありますので、正しいつけ方・はずし方・お手入れ方法を守り、快適なコンタクトレンズライフを送ってください

2液型のお手入れ「東レ洗浄保存液」「東レバイオクリーナー」を使用

レンズをはずしたとき

手指を石けんできれいに洗い、石けん分が残らないように十分すすぎ、しっかり水を切ってください。洗面台の排水口にはレンズが流れて紛失しないようにレンズキャッチを置いてください。



1. レンズケースを水道水できれいに洗ってください。レンズケースの右(R)には右のレンズを、左(L)には左のレンズをセットしてください。レンズケースの中に東レ洗浄保存液を9分目まで入れてください。(図A)
2. さらに、東レバイオクリーナーをレンズ1枚につき1～2滴入れてください。(図B)
注 汚れのひどい場合又は短時間で洗浄したい場合は3～5滴使用してください。
3. レンズケースのキャップをしっかりと閉め、軽く振ってください。(図C)
4. レンズ装用まで少なくとも2時間以上はそのまま放置してください。(図D)

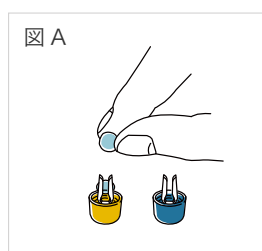

🕒 2時間放置後

レンズをつけるとき

1. 手指を石けんできれいに洗い、レンズをレンズケースから取り出し、手のひらにレンズの凹面を上にしてレンズを置いてください。東レ洗浄保存液をレンズの両面に数滴落とし、指で軽くこすり洗いをしてください。(図A)
注 東レ洗浄保存液でレンズを洗う場合、絶対に凸面を上にして洗浄しないでください。
2. 水道水でよくすすいでから装用してください。(図B)

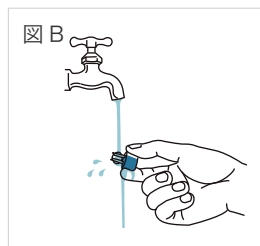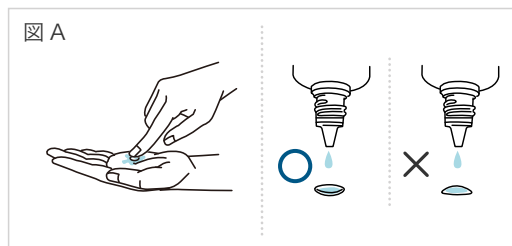

レンズを長期保存(1週間以上)する場合

1. 東レバイオクリーナーと東レ洗浄保存液で洗浄保存(一晩)してください。
2. 装用時と同様にレンズを東レ洗浄保存液で軽くこすり洗いして水道水ですすいでください。
3. 水道水でよく洗ったレンズケースに東レ洗浄保存液を満たし、レンズを収納、保存してください。
4. 細菌汚染防止のため東レ洗浄保存液は1週間に一度交換してください。
東レ洗浄保存液を交換する際は、レンズケースも洗浄してください。
5. 装用を再開するときは必ず眼科医の検査を受けてください。